


Alcom A110

SENGEVAKT

Art. nr.: 11000001

Sengevakt for varsel om forlatt seng.

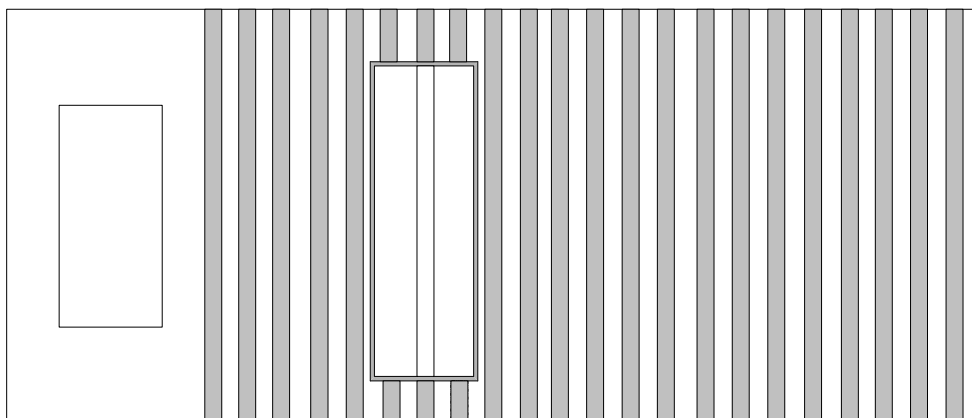

Montering:

A110 plasseres i sengen under pasientens seteparti. NB! Pass på at midten av matten har fast underlag. For eksempel om det er trespiler i sengen må en ev disse gå under midten av matten. Er det strekte fjærer (eller annet mykt materiale) i bunnen må matten plassers på en plate AL201 Underlagsplate. Sengevakt A110 legges på tvers i sengen, som på tegningen. Flate partiet ned.

OBS! vær oppmerksom på at matten kan fungere dårligere på en del madrasser som Tempur madrasser da disse fordeler vekten på en annen måte enn vanlig madraser. Madrassen fungerer fra 30 til 100kg.

Vedlikehold:

Maten vaskes (tørkes av) med en fuktig klut. Matten må ikke utsette for vridning da vil limet som er elastisk slippe taket og bunnen kan løsne.

Innkobling:

RJ45 pinne 4 og 5 (de to midterste).

Renhold:

Tørkes av med fuktig klut.

