


Bruksanvisning

Enureslarm

BW900

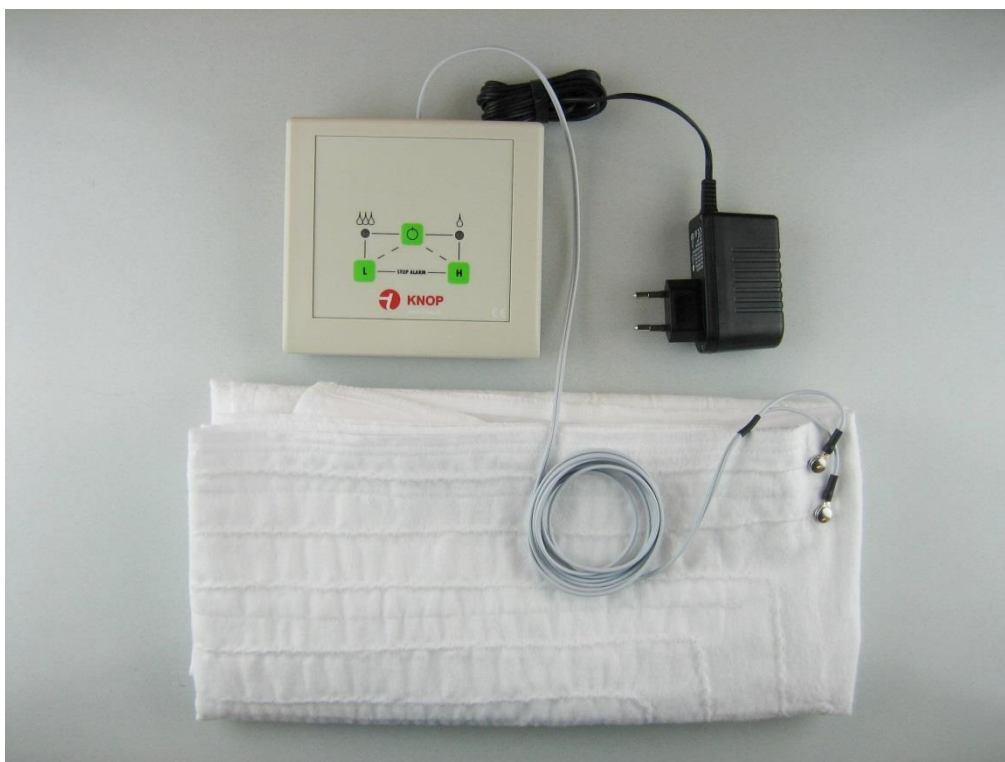

KNOP REHATEK AB
Kristinebergsvägen 17
SE-302 41 Halmstad
Tel: 020 – 12 12 34

Innehåll

Introduktion:.....	3
Förberedelse:.....	3
Test och användning	3
Kontroll av räckvidden.....	3
Inställning av fuktkänslighet:	3
När BW900 ringer:.....	3
Schema:	4
Avslutning:	5
Reläutgång:	6
Rengöring:.....	6
Miljö.....	6
Tillbehör:.....	6
Tekniska data:	7
Schema för Enureslarm	8

Introduktion:

BW900 larmar när madrassen i brukarens säng blir våt.

Rör det sig om ett barn man ska lära att bli torr, kan man använda den inbyggda högtalaren till att väcka barnet så att han eller hon kan gå på toaletten.

Samtidigt kan BW900 larma föräldrarna genom att aktivera en mottagare i KNOP REHATEK's 900-serie.

Rör det sig om en sängliggande brukare, kan man skruva ner ljudet vid sängen, men låta BW900 larma personalen via en trådlös mottagare i KNOP REHATEK's 900-serie.


Förberedelse:

Barnet eller brukaren bör sova direkt på enuresmattan, BW900-S.

Enuresmattan i bomull bäddas ovanpå det vanliga underlakanet med tryckknapparna uppåt.

Vik enuresmattan runt om madrassen, så att den ligger fast.

Anslut VÄCKAREN till enuresmattan och sätt på  knappen.

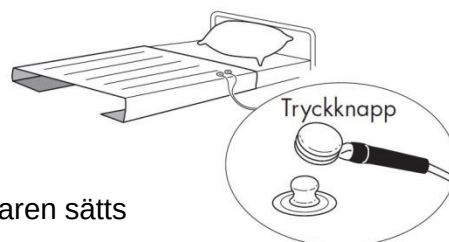

Test och användning

Det är viktigt att barnet lär sig BW900's funktioner och vet hur väckaren sätts på och stängs av.

Testa väckaren genom att hålla de två tryckknapparna mot varandra.

Ljudet kan ställas i på volymknappen på baksidan av BW900.

Se bruksanvisningen för larmmottagaren hur man kodar in sändaren.

Alla ingående delar i systemet bör testas regelbundet.

Kontroll av räckvidden

BW900 har en räckvidd på cirka 75m vid fri sikt. Aktivera BW900 se "Test och användning" och be personen som har larmmottagaren att röra sig runt i byggnaden. Upprepa flera gånger för att säkerställa mottagning där personal finns. Räckvidden kan utökas med hjälp av en repeater. Kontakta KNOP Rehatek för mer information.

Inställning av fuktkänslighet:

På larmet finns möjlighet att justera fuktkänslighet.



låg känslighet:

Används om barnet svettas mycket, för att undvika falsklarm.



hög känslighet:

Rekommenderad inställning vid användning av enuresmatta i bomull.

Känsligheten ändras genom att hålla  eller  nedtryckt och samtidigt trycka på .

När BW900 ringer:



När larmet väcker barnet, är det viktigt att barnet själv stänger av BW900 och går på toaletten och tömmer blåsan helt.

Larmsignalen avbryts genom att samtidigt trycka på  och  knappen (ca 2 sek.)

Byt ut den våta enuresmattan och anslut ledningarna till tryckknapparna.

Kontrollera att BW900 lyser grönt som indikation på att den är klar att användas..

Om BW900 lyser rött, är den i larmläge.

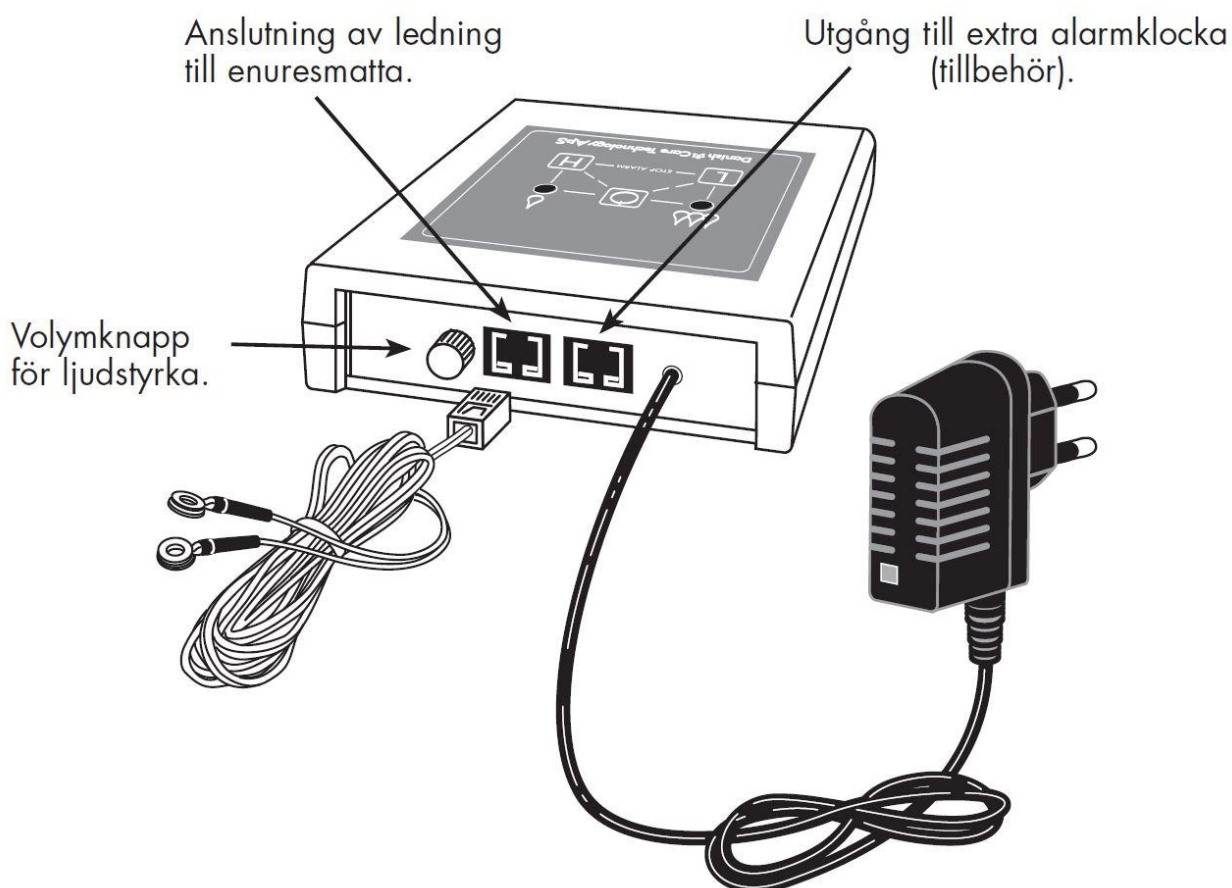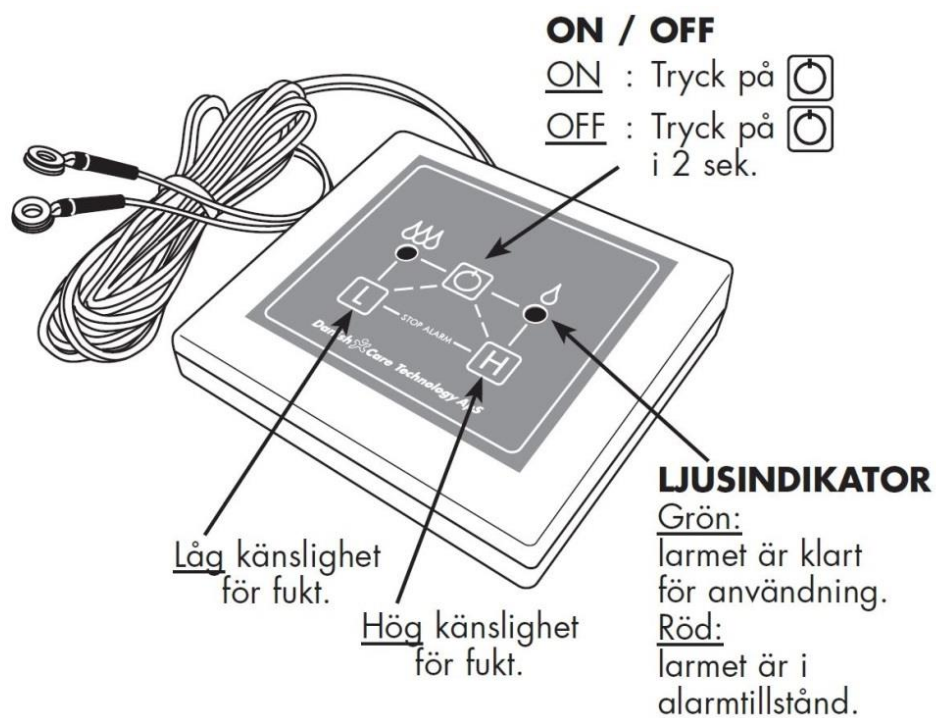

Bifogat schema, om det fylls i löpande, kan vara till hjälp för behandlande läkare/sjuksköterska vid rådgivning och avslutning.



Det är viktigt att barnet uppnår säkerhet att vara torr varje natt en längre period innan behandlingen avslutas.
Har man provat larmet 1 månad utan någon torr natt eller andra framsteg, bör man avbryta behandlingen för en tid.
För ytterligare vägledning kontakta behandlande läkare/sjuksköterska.

Reläutgång:

Reläutgången som finns på BW900, är en potentialfri utgång. 8-polig modular kontakt. Slutning mellan ben 3 och 8, för anslutning till befintlig larmanläggning mm.
Se också ”Teknisk data”

OBS: Övriga ben får ej användas.

Rengöring:

BW900 rengörs med en fuktig trasa eller våtservett.

Enuresmattan i bomull **kan tvättas**:



Handtvätt alt. 40°C fintvätt.




Kan strykas, dock högst 200°C.



Bör ej torktumlas.



Bör ej centrifugeras.

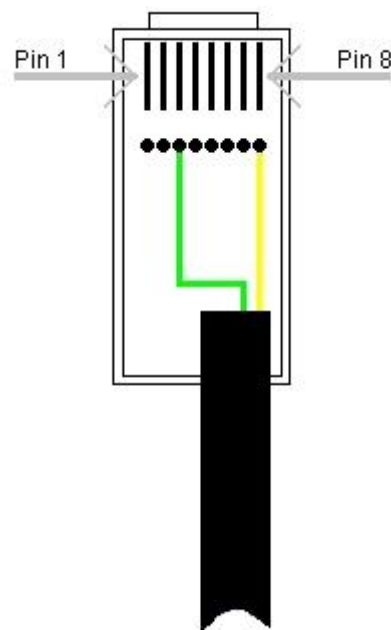

Miljö

Produkten innehåller elektronik.

När produkten är förbrukad får den inte kastas med vanligt hushållsavfall utan skall återvinnas som el-avfall. Kontakta din kommun om du inte vet var du kan lämna in el-avfall.



Tillbehör:

Enuresmatta i bomull

BW900S, Bedwetting sensor

Extern anslutningskabel:

BW900L, Kabel mellan enuresmatta och BW900

Tekniska data:

BW900:

Radio...

Frekvens: 869,212 MHz

Räckvidd: Ca 75 m vid fri sikt

Strömförsörjning: AC/DC adapter, 12V 700mA
FW7333M/12, Medicinsk godkänd.

Driftsmiljö: Inomhus, <90% luftfuktighet, 0-40°C

Material kabinett: Vit ABS
Kabinett dimensioner: H: 44 mm, B: 138 mm, L: 127 mm.

Anslutningar: 6 pol modular: Anslutning enuresmatta
8 pol modular: Potentialfri reläkontakt mellan
ben 3 og 8. Max 24V/1A.
Övriga ben får ej användas.

BW900-S, Enuresmatta i bomull:

Dimensioner: 140 x 70 cm

Sensoryta:: Ca. 65 x 65 cm

Livslängd: Det rekommenderas att ha 2st enuresmattor till 1 behandlingsperiod.

Rätt till ändringar förbehålles.



Schema för Enureslarm



KNOP
REHATEK

Fyll i schemat varje natt som BW900 används..

Sätt ett X under ☺ när brukaren har sovitt en natt utan att kissa i sängen.

Sätt ett X i 💧 när sängen endast är lite våt och ett X i 💧💧 när sängen är mycket våt.

Schemat är viktigt för att kunna följa utvecklingen.

Natt	☺	💧	💧💧	KOMMENTAR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Natt	☺	💧	💧💧	KOMMENTAR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Natt	☺	💧	💧💧	KOMMENTAR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Natt	☺	💧	💧💧	KOMMENTAR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Natt	☺	💧	💧💧	KOMMENTAR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Natt	☺	💧	💧💧	KOMMENTAR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Natt	☺	💧	💧💧	KOMMENTAR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Natt	☺	💧	💧💧	KOMMENTAR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Natt	☺	💧	💧💧	KOMMENTAR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Natt	☺	💧	💧💧	KOMMENTAR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Natt	☺	💧	💧💧	KOMMENTAR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Natt	☺	💧	💧💧	KOMMENTAR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Natt	☺	💧	💧💧	KOMMENTAR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Natt	☺	💧	💧💧	KOMMENTAR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Natt	☺	💧	💧💧	KOMMENTAR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				