

Bruksanvisning EPI900-S / Epi-Sond



KNOP REHATEK AB
GIAB huset
Ankdammsgatan 35
SE-171 67 Solna
Tel: 020- 12 12 34

Bruksanvisning för separat vibrationssond till EPI-900

1.1.1 Allmänt

Vibrationssonden är en separat ”känselfel” som ansluts till anfallsalarm EPI-900. Sonden ansluts till det ÖVRE uttaget på EPI-900 och används i de fall när EPI-900 inte kan hängas under sängen eller när man vill registrera ”små lätta” skakningar hos en person.

1.1.2 Placering

Sonden placeras lämpligen mellan madrass och underlakan i närheten av den kroppsdel som har de tydligaste skakningarna.

OBS! Sonden är märkt med ”Denne side op” (Denna sidan upp) och skall så placeras i sängen! EPI-900 kan nu placeras vid sidan av sängen (behöver således ej hänga under sängen) så att det blir lätt att komma åt inställningarna.

1.1.3 Inställning

Följ bruksanvisning för EPI-900. Viktigt är att följa inställning av PULS – alltså antalet skakningar som EPI-900 skall larma vid. Eftersom den separata vibrations-sonden är mycket känslig är det viktigt att rätt värde ställs in så att inte alltför många ”falsklarm” erhålls.

1.2 Miljö

Produkten innehåller elektronik.

När produkten är förbrukad får den inte kastas med vanligt hushållsavfall utan skall återvinnas som el-avfall.

Kontakta din kommun om du inte vet var du kan lämna in el-avfall.



1.3 Tekniska data

| | |
|-----------------|---------|
| Artikelnr: | EPI900S |
| Batterier: | Inga |
| Kapslingsklass: | IP67 |
| Färg: | Vit |

